

Desempenho de valor acrescentado

Philips Respironics Pico – máscara nasal tradicional

Guia de ajuste da máscara



1

Antes de colocar a máscara, certifique-se de que a almofada se adapta à largura do seu nariz sem bloquear as narinas.



2

Desencaixe os clips do arnês rodando-os como uma chave para os soltar da estrutura.



3

Segurando a máscara contra o rosto, puxe o arnês com cuidado por cima da cabeça.



4

Volte a encaixar os clips do arnês pressionando-os contra a estrutura da máscara.



5

Ajuste as correias inferior e superior puxando as patilhas com cuidado. Não aperte demasiado. A máscara deve ajustar-se de forma confortável.



6

Os ajustes finais em termos de conforto e vedação devem ser feitos enquanto estiver deitado com a pressão do dispositivo aplicada.

Estão disponíveis informações mais pormenorizadas sobre o ajuste nas instruções fornecidas com a máscara.

Para mais informações, visite www.philips.com/respironics

Broudy CS 11/20/14 MCI 4106469 PN 1120132

PHILIPS

RESPIRONICS