




- 1 Imprima o guia de tamanho em "Tamanho real" ou "100%".

Para conferir se a impressão está correta verifique se o quadrado mede 2,5 cm:

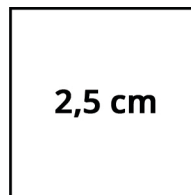

- 2 Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o de acordo com as indicações.


- 3 Matenha a boca naturalmente aberta e experimente cada tamanho.

(1) A parte superior da almofada deve ficar na ponte nasal alinhada com a altura dos olhos.

(2) A base da almofada deve ficar no meio do queixo, cerca de 1 cm abaixo do lábio inferior.




Escolha o menor tamanho que cobre a boca e o nariz, sem obstruir os olhos ou encostar nos lábios.

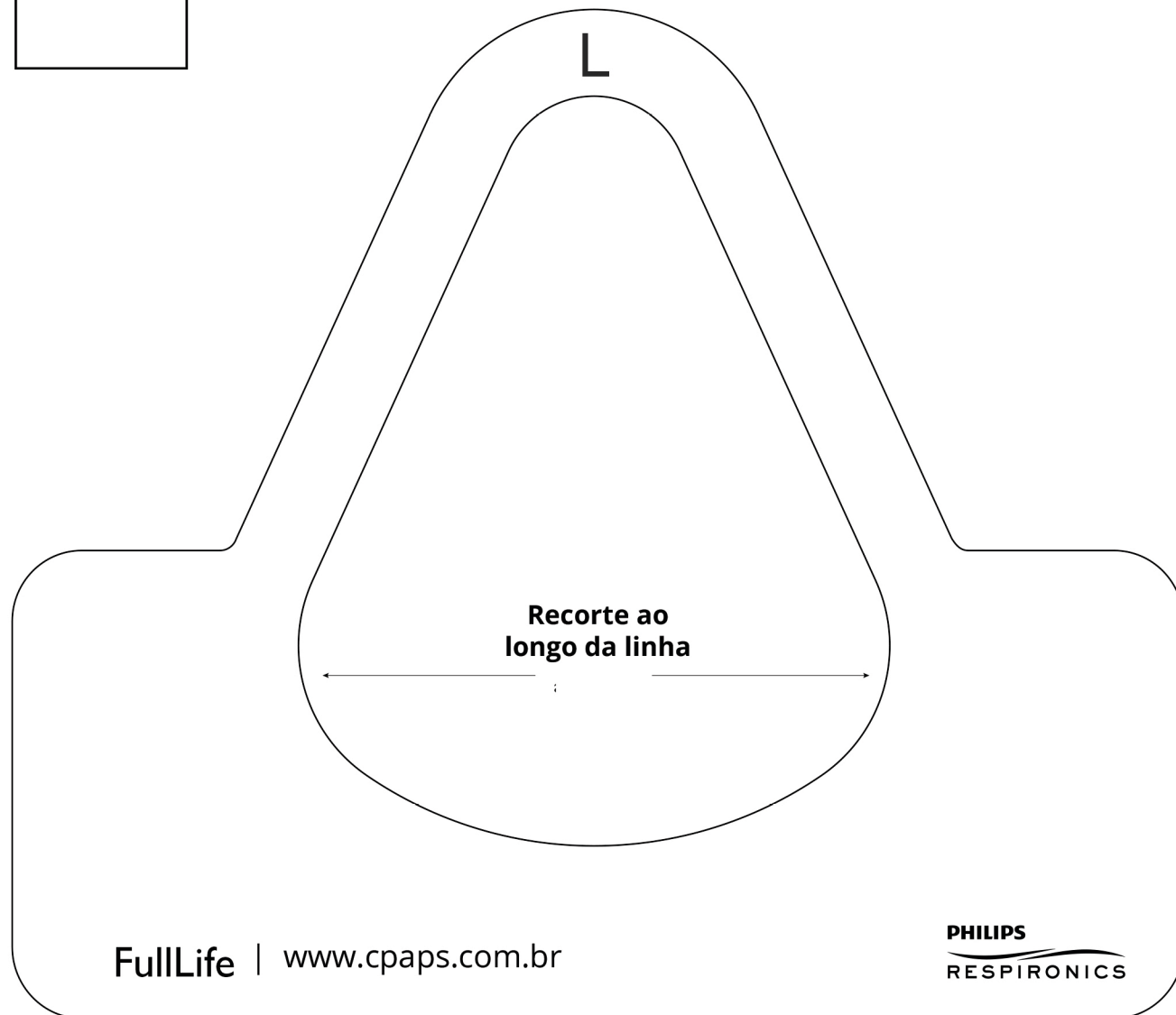



GUIA DE TAMANHO

Para conferir se a impressão está correta verifique se o quadrado mede 2,5 cm:

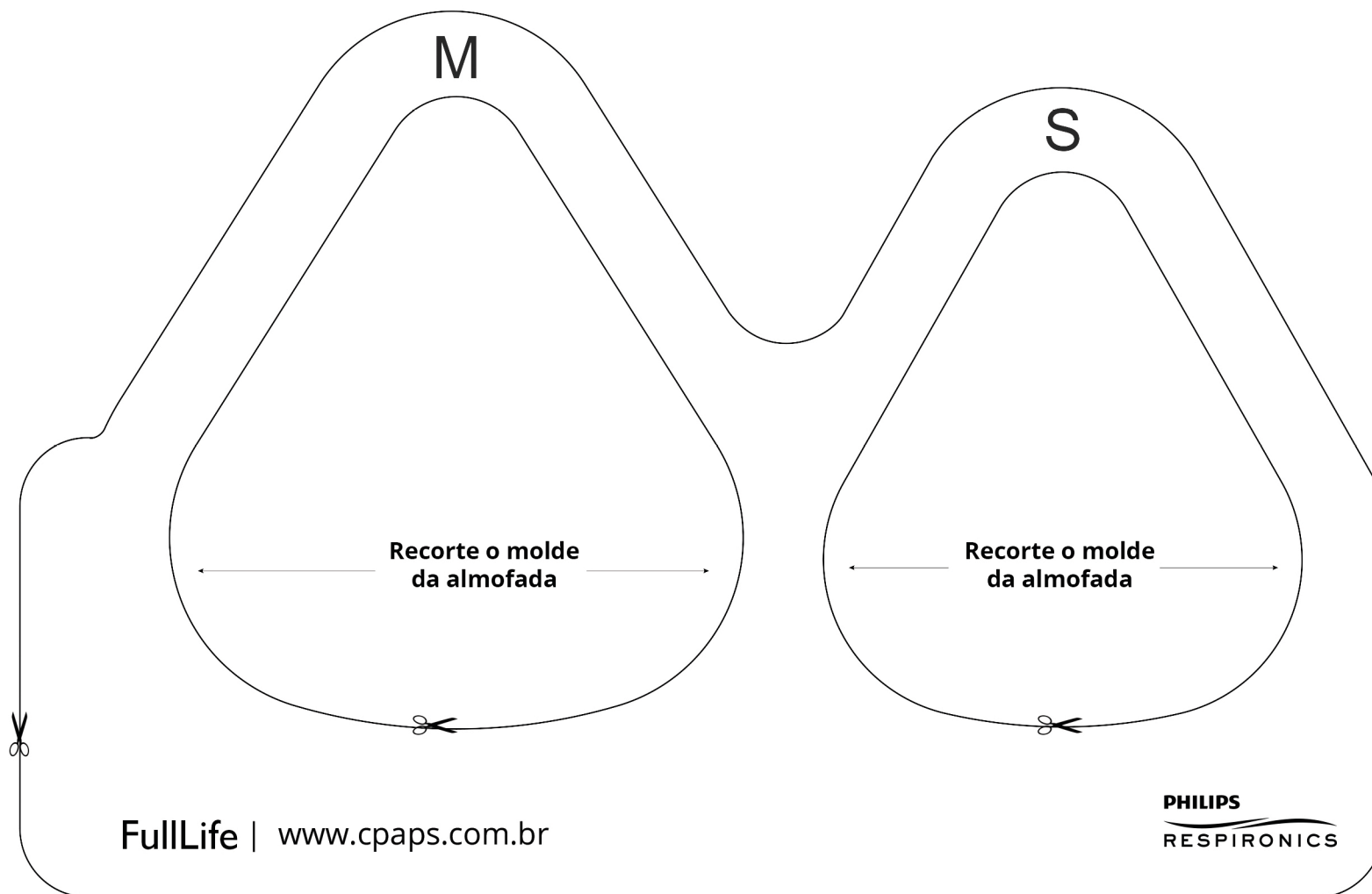

FullLife | www.cpaps.com.br

PHILIPS
RESPIRONICS