




# GUIA DE TAMANHO

- 1 Imprima o guia de tamanho em "Tamanho real" ou "100%".

Para conferir se a impressão está correta verifique se o quadrado mede 2,5 cm:

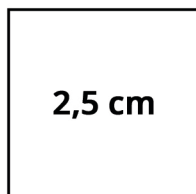


- 2 Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o de acordo com as indicações.

- 3 Experimente cada molde de almofada no nariz e escolha o menor tamanho de almofada que não fique obstruindo as laterais do nariz ou os olhos.




**Mirage™ FX**  
NASAL MASK

www.cpaps.com.br

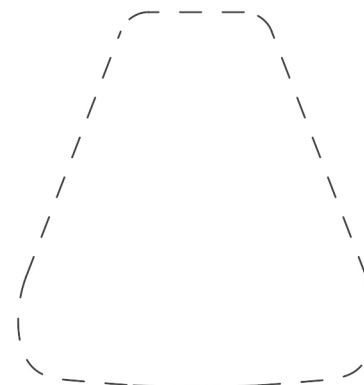

**Tamanho Padrão (STD)**  
Altura: 5,0 cm  
Largura: 4,8 cm

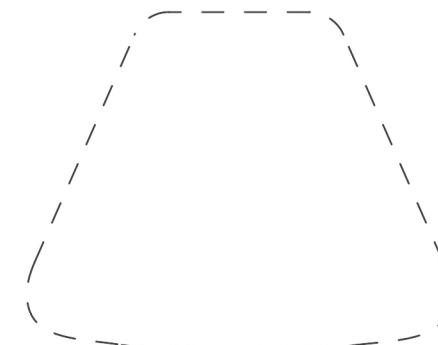

**Tamanho Largo (Wide)**  
Altura: 4,5 cm  
Largura: 5,6 cm