




# GUIA DE TAMANHO

**1** Imprima o guia de tamanho em "Tamanho real" ou "100%".

**Para conferir se a impressão está correta verifique se o quadrado mede 2,5 cm:**

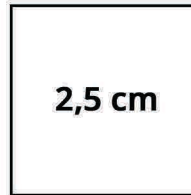

**2** Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o de acordo com as indicações.

**3** Coloque o guia de tamanho na base do nariz e escolha o menor tamanho de almofada que não fique obstruindo as laterais do nariz.

Verifique nas imagens abaixo que o paciente usa o tamanho Pequeno (S).

