




GUIA DE TAMANHO

1 Imprima o guia de tamanho em "Tamanho real" ou "100%".

Para conferir se a impressão está correta verifique se o quadrado mede 2,5 cm:

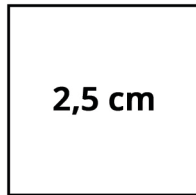

2 Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o de acordo com as indicações.

3 Experimente cada molde de almofada no nariz e escolha o menor tamanho de almofada que não fique obstruindo as laterais do nariz ou os olhos.



Mirage Micro™
Mirage Activa™ LT
Mirage™ SoftGel

Tamanho Pequeno (S)
 Altura: 4,0 cm
 Largura: 3,8 cm

Tamanho Médio (M)
 Altura: 4,7 cm
 Largura: 4,2 cm

Tamanho Grande (L)
 Altura: 4,8 cm
 Largura: 4,5 cm

Tamanho Grande largo (LW)
 Altura: 4,3 cm
 Largura: 4,8 cm

(somente Mirage Micro)
Tamanho Extra grande (XL)
 Altura: 4,3 cm
 Largura: 5,2 cm