

Lista de compatibilidade entre baterias/dispositivos

Neste suplemento são especificadas as baterias compatíveis com os dispositivos de terapia da ResMed, as tensões de saída CC dos dispositivos e a autonomia das baterias.

Dispositivo ¹	Autonomia das baterias ²		Tensão de saída CC do dispositivo	Parâmetros do dispositivo												
	Power Station II (h) ³	Power Station (h)		EPAP (cm H ₂ O)	IPAP (cm H ₂ O)	Tempo de subida (ms)	Relação I:E	Fuga (l/min)	Frequência respiratória (rpm)	Volume corrente (ml)	Ti mín. (seg.)	Ti máx. (seg.)	Máscara	Climate Control	Humidade	Tubo aquecido (°C)
AirSense™ 10, AirCurve™ 10	14.3		24V	10				0	15	400			Ultra Mirage Máscara Nasal	Manual	Desl.	Desl.
	3.35			20					20	20	500			Ultra Mirage Máscara Nasal	Manual	4 (Média)
Lumis™ S/ST	10.25		24V	5	15	150	1:1	0	20	400	0.3	4	Máscara Facial UM com SlimLine	Manual	3 (Predefinida)	Desl.
	2			15	25	Min	1:1	30	20	650	0.3	4	Máscara Facial UM com ClimateLine	Manual	3 (Predefinida)	27
Lumis™ ST-A	9.5		24V	5	15	150	1:1	0	20	400	0.3	4	Máscara Facial UM com SlimLine	Manual	3 (Predefinida)	Desl.
	1.25			20	30	Min	1:1	30	20	650	0.3	4	Máscara Facial UM com ClimateLine	Manual	3 (Predefinida)	27
S9 AutoSet™, S9 Elite™, S9 Escape™, S9 Escape Auto™	13		24V	10				0	15	400			Ultra Mirage II Máscara Nasal		Desl.	Desl.
	2 ⁴			20					0	20	500			Ultra Mirage II Máscara Nasal		3 (Média)
VPAP™ S (S9), VPAP™ ST (S9), VPAP™ ST (S9 iVAPS), VPAP™ Adapt (S9), VPAP™ Adapt (S9 ASV), AutoSet CS™ (S9), AutoSet CS™ (S9 PaceWave), VPAP™ Auto (S9), V-Auto (S9), Auto 25 (S9)	12		24V	5	15	150	1:1	0	20	400	0.3	4	Máscara Facial UM com SlimLine	Manual	3 (Predefinida)	Desl.
	2 ⁴			15	25	Min	1:1	30	20	650	0.3	4	Máscara Facial UM com ClimateLine	Manual	3 (Predefinida)	27

Dispositivo ¹	Autonomia das baterias ²		Tensão de saída CC do dispositivo	Parâmetros do dispositivo												
	Power Station II (h) ³	Power Station (h)		EPAP (cm H ₂ O)	IPAP (cm H ₂ O)	Tempo de subida (ms)	Relação I:E	Fuga (l/min)	Frequência respiratória (rpm)	Volume corrente (ml)	Ti mín. (seg.)	Ti máx. (seg.)	Máscara	Climate Control	Humidade	Tubo aquecido (°C)
VPAP™ ST-A (S9), VPAP™ ST-A (iVAPS), AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave), VPAP™ COPD (S9)	11		24V	5	15	150	1:1	0	20	400	0.3	4	Máscara Facial UM com SlimLine	Manual	3 (Predefinida)	Desl.
	1.75			20	30	Min	1:1	30	20	650	0.3	4	Máscara Facial UM com ClimateLine	Manual	3 (Predefinida)	27
Stellar™	8		24V	5	15	Min	1:1	0	20	660	0.8	1.5	Máscara Facial UM			
	2			4	40	Min	1:1	20	40	445	0.8	1.5	Traq			

Dispositivo ¹	Autonomia das baterias ²		Tensão de saída CC do dispositivo	Parâmetros do dispositivo									
	Power Station II (h) ³	Power Station 26V (h)		Modo	PI (cm H ₂ O)	PEEP (cm H ₂ O)	Vc	F (rpm)	Tempo de subida (seg.)	Ti (seg.)	Tgl (P)	Tgl (V)	Inclinação
VS III™	7		26V	(A)PCV	20	0	Não	15	2	1.2	Não	Não	3
	4.5			(A)CV		0	800 ml	16	0	1.2	Não	Não	0
Elisée™ 150	6	13	26V	(A)PCV	20	0	Não	15	2	1.2	Não	Não	3
	4.5	9		(A)CV		0	800 ml	16	1	1.2	Não	Não	0

1 Nem todos os dispositivos estão disponíveis em todas as regiões. Para obter informações sobre a utilização destes dispositivos, consulte os respectivos manuais do utilizador.

2 A autonomia baseia-se nas configurações de utilização normais. Todos os testes foram efectuados à temperatura ambiente de 23°C. Os valores podem variar consoante os parâmetros do dispositivo, fuga, padrão respiratório do paciente, condições ambientais ou idade da bateria.

3 A autonomia indicada é para uma só bateria. Quando são ligadas duas baterias com o acoplador de bateria, a autonomia duplica. A autonomia é afectada pelos ciclos de recarregamento da bateria. Os tempos especificados acima referem-se a uma RPS II nova. Após 500 ciclos de recarregamento, a bateria durará cerca de 60% em relação ao seu estado original. A carga total de uma bateria usada não dura tanto como a de uma bateria nova.

4 A autonomia é afectada pelo aumento de temperatura da definição do tubo aquecido acima da temperatura ambiente.



Stellar **ResMed Germany Inc.** Fraunhoferstr. 16 82152 Martinsried Alemanha

VS III, Elisée 150 **ResMed Paris** 240 rue de la Motte 77550 Moissy-Cramayel França

Todos os outros **ResMed Ltd** 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Austrália

DISTRIBUÍDO POR

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 EUA

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Austrália

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Austrália

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 EUA

ResMed (UK) (para Resmed Ltd) 96 Jubilee Ave Milton Park

Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Reino Unido

Consulte ResMed.com. para conhecer outras localizações da ResMed a nível mundial. AirSense, AirCurve, Lumis, S8, S9, Stellar, AutoSet, AutoSet CS, PaceWave, VPAP, Elisée e VS III são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas do grupo de empresas ResMed. Para informações de patentes e outras informações relativas a propriedade intelectual, consulte ResMed.com/ip. © 2016 ResMed Ltd. 1018092/5 2016-03

